

# Monteringsanvisning

R82<sup>®</sup>

## Montering av riktningsspärr på Pony

Följ anvisningen nedan för att montera riktningsspärren (B) på Pony.

Riktningsspärren monteras vid de två framhjulen (A) på Pony.

- \* Aktivera spärren genom att svänga ned 'benen' (E).
- \* Kontrollera att hjulen (A) pekar i rätt riktning, som bilden visar.
- \* Placera spärren (B) över ramen bakom hjulen, som bilden visar.
- \* Dra åt skruven (C)

När riktningsspärren monterats är det enkelt att aktivera och deaktivera den genom att svänga 'benen' (E) uppåt eller nedåt.

För exakt justering av riktningsspärren går det att lossa skruven undertill (D) och sedan justera spärren. Dra därefter åt skruven igen.

