


# Sprängskiss Pony

# INNEHÅLL


|                              |      |
|------------------------------|------|
| Gästol Pony stl 0 .....      | 3-4  |
| Tillbehör Pony stl 0 .....   | 5-6  |
| Ledsagarhandtag              |      |
| Lodrätt handtag invändigt    |      |
| Lodrätt handtag utvändigt    |      |
| Rotationsspärr framhjul      |      |
| Sidostöd                     |      |
| Underarmsstöd                |      |
| <br>                         |      |
| Gästol Pony stl 1-2 .....    | 7-8  |
| Tillbehör Pony stl 1-2 ..... | 9-10 |
| Ledsagarhandtag              |      |
| Lodrätt handtag invändigt    |      |
| Lodrätt handtag utvändigt    |      |
| Magplatta                    |      |
| Rotationsspärr framhjul      |      |
| Sidostöd                     |      |
| Underarmsstöd                |      |

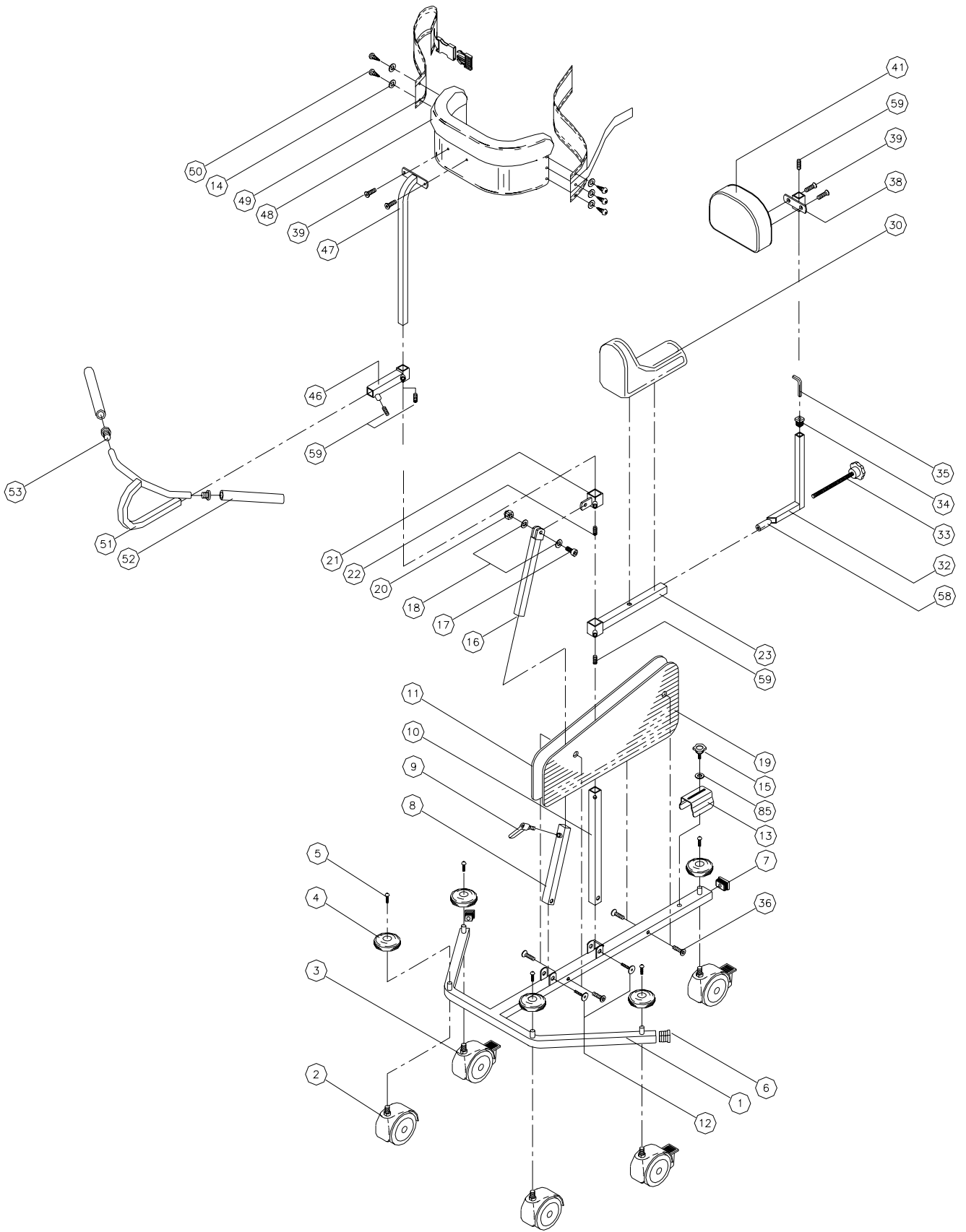

# PONY stl 0

| POS | BENÄMNING                        | ART NR     |
|-----|----------------------------------|------------|
| 1   | Chassi Pony stl 0                | 3181866    |
| 2   | Hjul 75mm svart utan broms       | 313006850  |
| 3   | Hjul 75mm svart med broms        | 313006800  |
| 4   | Stötdämpare                      | 312522100  |
| 5   | Skruv M8x16 fzb svart            | 310650800  |
| 6   | Ändavslutning E20x20x1 0-2       | 312504500  |
| 7   | Ändavslutning FR30x20x1 0-2      | 312507005  |
| 8   | Ytterrör för vinkling Pony stl 0 | 3181867    |
| 9   | Vred 42mm M8x16                  | 313502500  |
| 10  | Stag pelare Pony stl 0           | 3181869    |
| 11  | Benskydd Pony stl 0 höger        | 316148170  |
| 12  | Skruv M8x30 fzb Pony stl 0-1     | 310625000  |
| 13  | Rotationsspärr hjul Pony stl0    | 3181677-42 |
| 14  | Bricka 6mm din 9021(se pos 48)   |            |
| 15  | Ratt M5x16 svart                 | 313551600  |
| 16  | Innerrör för vinkling Pony stl 0 | 3181868    |
| 17  | Skruv M8x25 fzb                  | 310602700  |
| 18  | Bricka 8mm fzb                   | 311102000  |
| 19  | Benskydd Pony stl 0 vänster      | 316148171  |
| 20  | Låsmutter 8mm                    | 311607000  |
| 21  | Vinklingsbeslag Pony stl 0-1     | 3181854    |
| 22  | Stoppskruv                       |            |
|     |                                  |            |
|     |                                  |            |
|     |                                  |            |


| POS | BENÄMNING                                      | ART NR     |
|-----|--|------------|
| 23  | Hållare ryggstöd stl 0 (se pos 30)             |            |
| 30  | Sits stl 0 kompl                               | 3186330    |
| 32  | Stag till ryggstöd stl 0 (se pos 41)           |            |
| 33  | Expansionssskruv (se pos 41)                   |            |
| 34  | Ändavslutning 15x15 inv med hål<br>(se pos 41) |            |
| 35  | Insexnyckel 4mm (se pos 41)                    |            |
| 36  | Skruv UH M5x16 fzb svart                       | 310589916  |
| 38  | Fäste ryggstöd (se pos 41)                     |            |
| 39  | Skruv M6x16 fzb<br>(se pos 30, 41, 48)         |            |
| 41  | Ryggstöd stl 0 kompl                           | 31864334   |
| 46  | Ytterrör för handtagsbåge stl 0                | 3181855-42 |
| 47  | Stag bålstöd stl 0 (se pos 48)                 |            |
| 48  | Bålstöd stl 0 kompl                            | 3186310    |
| 49  | Bälte stl 0 (se pos 48)                        | 315540250  |
| 50  | Skruv M6x16 fzb (se pos 48)                    |            |
| 51  | Handtagsbåge stl 0-1                           | 3181846    |
| 52  | Handtag 178mm stl 0-1                          | 312500650  |
| 53  | Ändavslutning D22x1, 0-2, 0                    | 312503000  |
| 58  | Expansionskloss ryggstöd<br>(se pos 41)        |            |
| 59  | Stoppskruv (se pos 30, 41)                     |            |
| 85  | Låsbricka                                      |            |
|     |  |            |

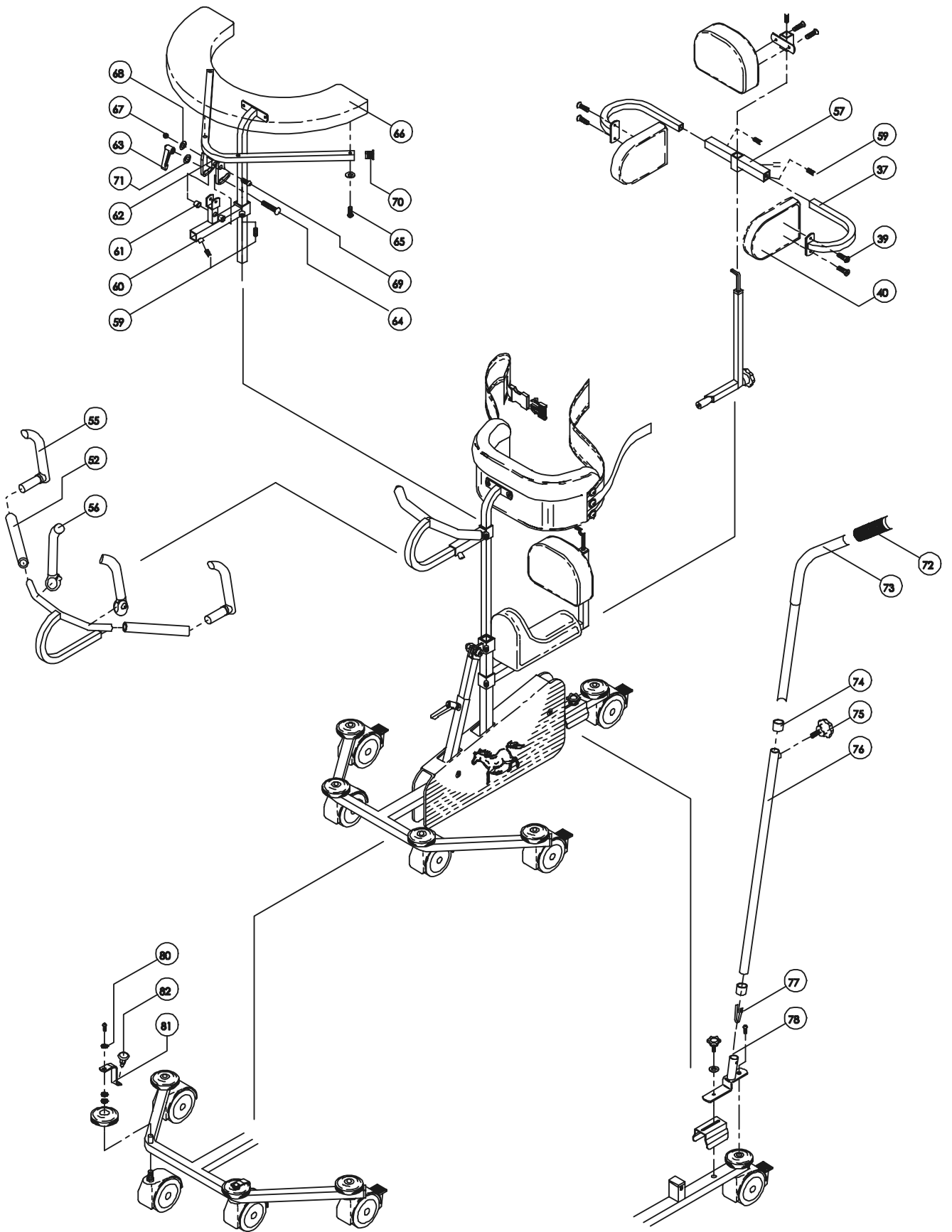

## TILLBEHÖR - PONY stl 0

- Ledsagarhandtag
- Lodrätt handtag invändigt
- Lodrätt handtag utvändigt
- Rotationsspärr framhjul
- Sidostöd
- Underarmsstöd


| POS | BENÄMNING                              | ART NR     |
|-----|--|------------|
| 37  | Fäste sidostöd böjt Pony stl 0-2       | 3181861    |
| 39  | Skruv M6x16 fzb                        | 310621600  |
| 40  | Dyna sidostöd PUR Pony stl 0           | 316175230  |
| 52  | Handtag 178mm                          | 312500650  |
| 55  | Handtag lodrätt invändigt, par         | 3186432    |
| 56  | Handtag lodrätt utvändigt, par         | 3186430    |
| 57  | Hållare sidostöd stl 0                 | 3181852-42 |
| 59  | Stoppskruv                             |            |
| 60  | Ytterrör för underarmsstöd stl 0       | 3181839-42 |
| 61  | Distans bord                           | 3181798    |
| 62  | Bygel till underarmsstöd stl 0-1       | 3181834    |
| 63  | Vred 65mm M8 bussning                  | 313502300  |
| 64  | Distansskruv M8x65 fzb                 | 311905700  |
| 65  | Stålskruv M6x25 fzb                    | 311901000  |
| 66  | Dyna underarmsstöd stl 0-1             | 315035900  |
| 67  | Låsmutter 6mm                          | 311606500  |
| 68  | Bricka                                 |            |
| 69  | Skruv M6x25 fzb svart                  | 310645625  |
| 70  | Ändavslutning E15x15x1.0-2.0 inv svart | 312503000  |
| 71  | Bricka 8mm fzb                         | 311102000  |
| 72  | (se pos 73)                            |            |
| 73  | Ledsagarhandtag kompl                  |            |
| 74  | (se pos 73)                            |            |
| 75  | (se pos 73)                            |            |
| 76  | (se pos 73)                            |            |
| 77  | (se pos 73)                            |            |
| 78  | (se pos 73)                            |            |
| 80  | (se pos 81)                            |            |
| 81  | Rotationsspärr framhjul sts            | 3186445    |
| 82  | (se pos 81)                            |            |

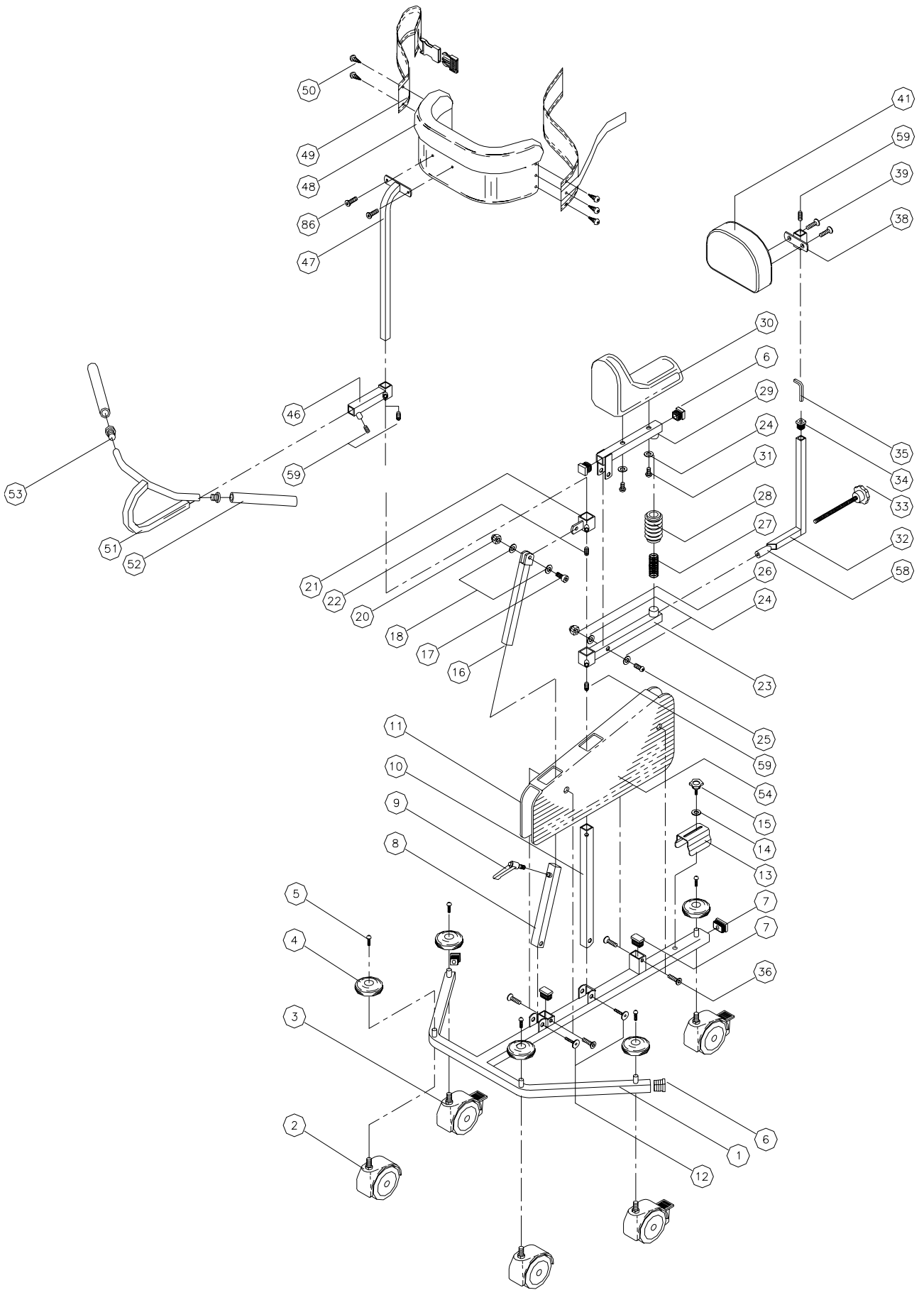

## PONY stl 1-2

| POS | BENÄMNING   | ART NR     |
|-----|---|------------|
| 1   | Chassi Pony stl 1                                 | 3181850-44 |
|     | Chassi Pony stl 2                                 | 3181820    |
| 2   | Hjul 75mm svart utan broms                        | 313006850  |
| 3   | Hjul 75mm svart med broms                         | 313006800  |
| 4   | Stödhjul 60mm svart till Pony                     | 312522100  |
| 5   | Insexskruv M8x16 fzb svart                        | 310650800  |
| 6   | Ändavslutning E20x20x1 0-2<br>(se pos 30)         |            |
| 7   | Ändavslutning FR30x20x1 0-2                       | 312507005  |
| 8   | Ytterrör för vinkling Pony stl 1                  | 3181859-44 |
|     | Ytterrör för vinkling Pony stl 2                  | 3181829    |
| 9   | Vred 42mm M8x16                                   | 313502500  |
| 10  | Stag pelare Pony stl 1                            | 3181851    |
|     | Stag pelare Pony stl 2                            | 3181821    |
| 11  | Benskydd Pony stl 1                               | 316148175  |
|     | Benskydd Pony stl 2                               | 316148200  |
| 12  | Skruv M8x30 fzb Pony stl 0-1                      | 310625000  |
|     | Skruv M8x40 fzb Pony stl 2                        | 310625040  |
| 13  | Rotationsspärr hjul Pony stl 1                    | 3181677-44 |
|     | Rotationsspärr hjul Pony stl 2                    | 3181677    |
| 14  | Bricka 6mm din 9021 Till nr 13                    | 311106000  |
| 15  | Ratt M5x16 svart                                  | 313551600  |
| 16  | Innerrör för vinkling Pony stl 1                  | 3181853    |
|     | Innerrör för vinkling Pony stl 2                  | 3181823    |
| 17  | Skruv M8x25 fzb                                   | 310602700  |
| 18  | Bricka 8mm fzb                                    | 311102000  |
| 20  | Låsmutter 8mm                                     | 311607000  |
| 21  | Vinklingsbeslag Pony stl 2                        | 3181854    |
| 22  | Stoppskruv  |            |
| 23  | Hållare till ryggstöd Pony stl 1-2<br>(se pos 30) |            |
| 24  | Bricka 6mm fzb (se pos 30)                        |            |
| 25  | Skruv M6x40 fzb (se pos 30)                       |            |
| 26  | Låsmutter 6mm                                     | 311606500  |

| POS | BENÄMNING                        | ART NR     |
|-----|----------------------------------|------------|
| 27  | Fjäder 7x22mm stl1               | 310310120  |
|     | Fjäder 25x62mm stl 2             | 310302000  |
| 28  | Plastmanchett 100mm Pony         | 312500700  |
| 29  | Stag till sits stl 1 (se pos 30) |            |
|     | Stag till sits stl 2 (se pos 30) |            |
| 30  | Sits stl 1 kompl                 | 3186331    |
|     | Sits stl 2 kompl                 | 3186332    |
| 31  | Skruv M6x30 fzb                  | 311901200  |
| 32  | Stag till ryggstöd stl 1-2       | 3181996    |
| 33  | Expansionskruv                   |            |
| 34  | Ändavslutning 15x15 inv med hål  | 312503950  |
| 35  | Insexnyckel 4mm                  |            |
| 36  | Stjärnskruv UH M5x16 fzb svart   | 310589916  |
| 38  | Fäste ryggstöd                   | 3182163    |
| 39  | Skruv M6x16 fzb                  | 310621600  |
| 41  | Dyna ryggstöd PUR stl 1-2        | 316175211  |
| 46  | Ytterrör handtagsbåge stl 1      | 3181855-44 |
|     | Ytterrör handtagsbåge stl 2      | 3181825    |
| 47  | Stag bålstöd stl 1 (se pos 48)   | 3181847    |
|     | Stag bålstöd stl 2 (se pos 48)   | 3181827    |
| 48  | Bålstöd stl 1 kompl              | 3186311    |
|     | Bålstöd stl 2 kompl              | 3186312    |
| 49  | Bälte stl 1 (se pos 48)          | 315540300  |
|     | Bälte stl 2 (se pos 48)          | 315540350  |
| 50  | Skruv M6x16 fzb (se pos 48)      |            |
| 51  | Handtagsbåge stl 0-1             | 3181846    |
|     | Handtagsbåge stl 2               | 3181826    |
| 52  | Handtag 178mm stl 0-1            | 312500650  |
|     | Handtag 475mm stl 2              | 312500651  |
| 53  | Ändavslutning D22x1, 0-2, 0      | 312503000  |
| 58  | Expansionskloss ryggstöd         |            |
| 59  | Stoppskruv (se pos 30)           |            |
| 86  | (se pos 48)                      |            |

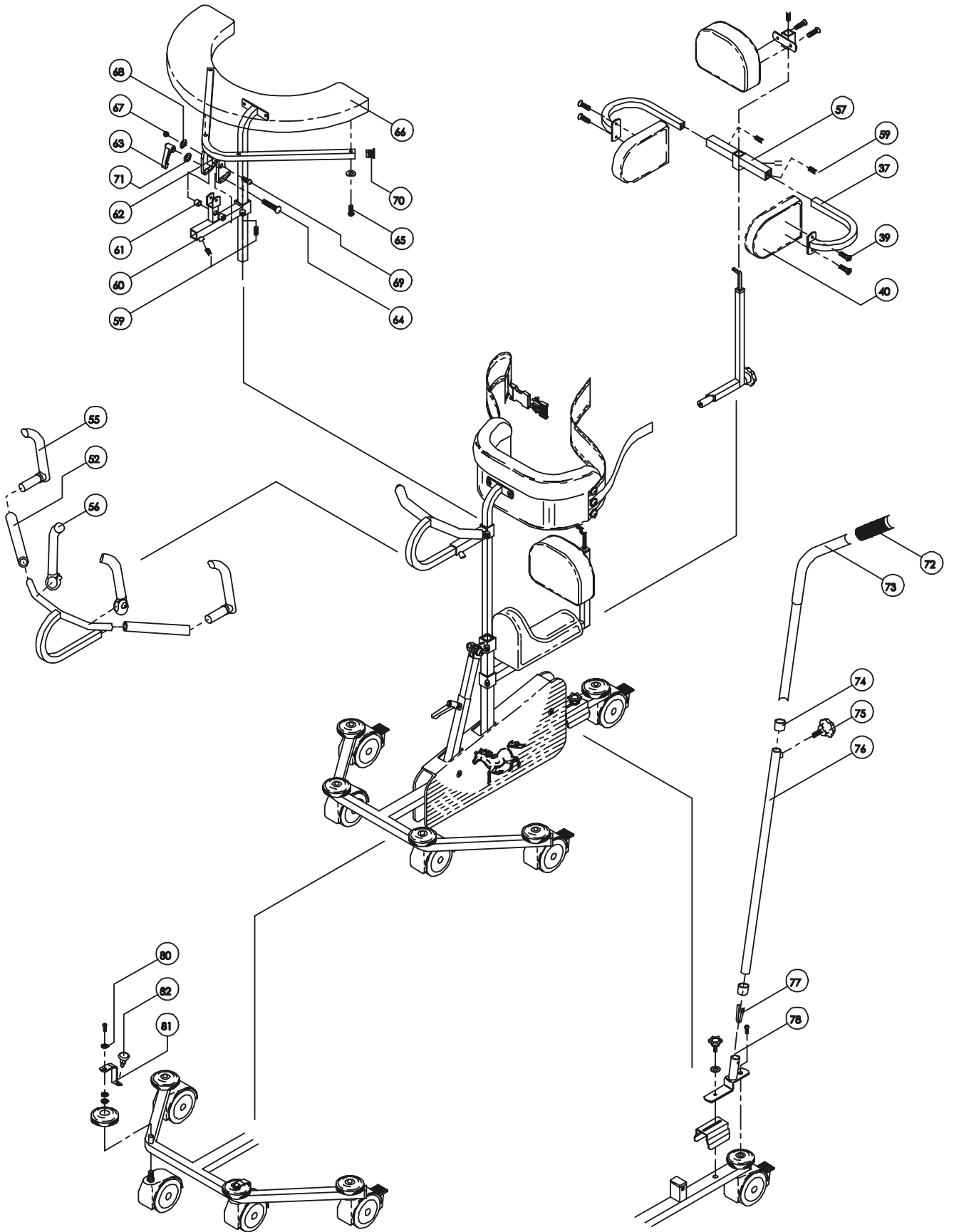

## TILLBEHÖR - PONY stl 1-2

- Ledsagarhandtag
- Lodrätt handtag invändigt
- Lodrätt handtag utvändigt
- Magplatta
- Rotationsspärr framhjul
- Sidostöd
- Underarmsstöd

| POS | BENÄMNING                        | ART NR     |
|-----|----------------------------------|------------|
| 37  | Fäste sidostöd böjt stl 0-2      | 3181861    |
| 39  | Skruv M6x16 fzb                  | 310621600  |
| 40  | Dyna sidostöd PUR stl 1-2        | 316175231  |
| 42  | Fäste magplatta stl 1-2          | 3181833    |
| 43  | Ändavslutning D15x1.0 svart      | 312501600  |
| 44  | Dyna magplatta PUR stl 1-2       | 316175221  |
| 45  | Hållare magplatta stl 1          | 3181838    |
|     | Hållare magplatta stl 2          | 3181832    |
| 52  | Handtag 178mm stl 0-1            | 312500650  |
|     | Handtag 475mm stl 2              | 312500651  |
| 55  | Handtag lodrätt invändigt, par   | 3186432    |
| 56  | Handtag lodrätt utvändigt, par   | 3186430    |
| 57  | Hållare sidostöd stl 1           | 3181852-44 |
|     | Hållare sidostöd stl 2           | 3181822    |
| 59  | Stoppskruv                       |            |
| 60  | Ytterrör för underarmsstöd stl 1 | 3181839-44 |
|     | Ytterrör för underarmsstöd stl 2 | 3181840    |
| 61  | Distans bord Pony                | 3181798    |
| 62  | Bygel till underarmsstöd stl 0-1 | 3181834    |
|     | Bygel till underarmsstöd stl 2   | 3181835    |
| 63  | Vred 65mm M8 bussning            | 313502300  |

| POS | BENÄMNING                                 | ART NR    |
|-----|---|-----------|
| 64  | Distansskruv M8x65 fzb                    | 311905700 |
| 65  | Stålskruv M6x25 fzb                       | 311901000 |
| 66  | Dyna underarmsstöd stl 0-1                | 315035900 |
|     | Dyna underarmsstöd stl 2                  | 315035910 |
| 67  | Låsmutter 6mm                             | 311606500 |
| 68  | Bricka                                    |           |
| 69  | Insexskruv M6x25 fzb                      | 310645625 |
| 70  | Ändavslutning E15x15x1.0-2.0<br>inv svart | 312503000 |
| 71  | Bricka 8mm fzb                            | 311102000 |
| 72  | (se pos 73)                               |           |
| 73  | Ledsagarhandtag kompl                     |           |
| 74  | (se pos 73)                               |           |
| 75  | (se pos 73)                               |           |
| 76  | (se pos 73)                               |           |
| 77  | (se pos 73)                               |           |
| 78  | (se pos 73)                               |           |
| 80  | (se pos 81)                               |           |
| 81  | Rotationsspärr framhjul sts               | 3186445   |
| 82  | (se pos 81)                               |           |