


# Sprängskiss Swan

# INNEHÅLL

Rubrik	Sida
Duschstol Swan.....	3-4

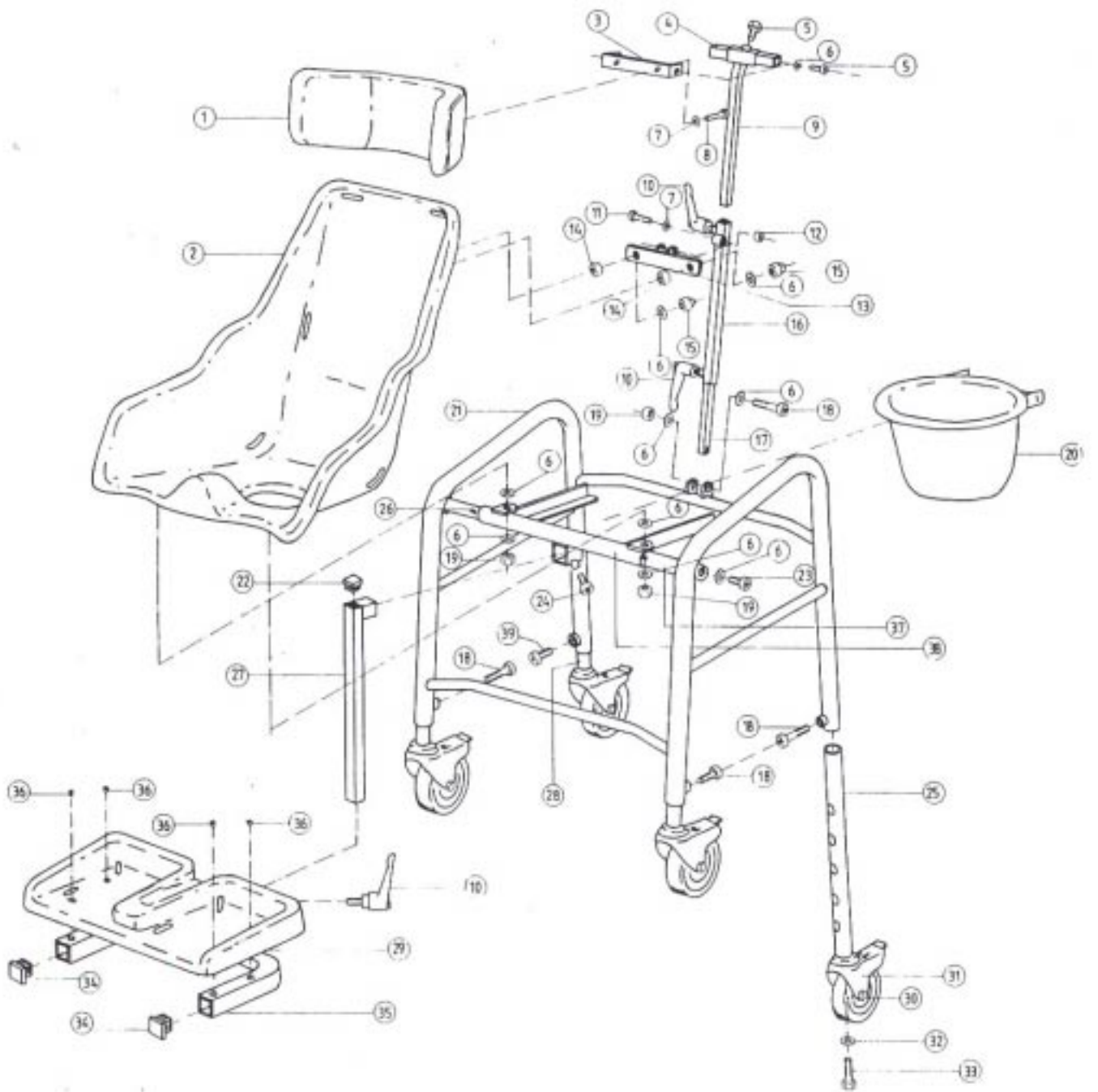

# SWAN

Pos	Benämning	Art nr
1	Se huvudstöd, säljes komplett	
2	Sits Swan stl 1	316126000
2	Sits Swan stl 2	316126500
2	Sits Swan stl 3	316127000
2	Sits Swan stl 4	316127500
2	Sits Swan stl 5	316128000
2	Sits Swan stl 6	316128500
2	Sits Swan stl 7	316135000
3	Se huvudstöd, säljes komplett	
4	Se huvudstöd, säljes komplett	
5	Se huvudstöd, säljes komplett	
6	Bricka 8 mm rfr	311105080
7	Bricka	
8	Se huvudstöd, säljes komplett	
9	Se huvudstöd, säljes komplett	
10	Vred M8x15 45 mm	313502700
11	Distansskruv M8x30 rfr	311902450
12	Låsmutter M6 rfs	311631060
13	Stag	
14	Distans ryggfäste	3181610
15	Kupolmutter M8 rfs	311781080
16	Ytterrör ryggvinkling stl 1-2	3181612
16	Ytterrör ryggvinkling stl 3-7	3181614
17	Innerrör Ryggvinkling stl 1-2	3181645
17	Innerrör Ryggvinkling stl 3-7	3181646
18	Skruv M8x35 rfr	310609835
19	Låsmutter M8 rfr	311631080
20	Potta Swan vit oval, nr 1 stl 1-2	3187200
20	Potta Swan vit oval, nr 2 stl 3-5	3187201
20	Potta Swan vit oval, stl 6-7	3187202

Pos	Benämning	Art nr
21	Underrede Swan stl 1	3181602
21	Underrede Swan stl 2	3181601
21	Underrede Swan stl 3-4	3181600
21	Underrede Swan stl 5	3181596
21	Underrede Swan stl 6	3181599
21	Underrede Swan stl 7	3181598
22	Ändavslutning	
23	Skruv M8x16 rfr	310609816
24	Skruv	
25	Justerben Swan utan hjul	3181618
26	Spännstift 4x26 mm rfr	310589000
27	Stag fotplatta Swan stl 1	3187026
27	Stag fotplatta Swan stl 2	3187027
27	Stag fotplatta Swan stl 3	3187028
28		
28	Ben Swan utan hjul	3181617
29	Fotplatta Swan stl 1	3187124
29	Fotplatta Swan stl 2	3187123
29	Fotplatta Swan stl 3	3187125
30	Hjul Swan std 4 hjul med skruv	3187100
30	Hjul Swan pvc 4 hjul med skruv	3187100-20
31	Se pos 30, säljes komplett	
32	Se pos 30, säljes komplett	
33	Se pos 30, säljes komplett	
34	Se pos 29, säljes komplett	
35	Se pos 29, säljes komplett	
36	Se pos 29, säljes komplett	
37		
38		